

印康三伏贴空白贴产品问答

问：三伏贴空白贴其它的名称叫什么？

答：三伏贴空贴，空白穴位贴，透气胶贴，穴位固定贴等等

问：三伏贴空白贴的规范名称是什么？

答：医用胶布

问：三伏贴空白贴有几种型号规格？

答：型号：A 型（通用型）、B 型（加垫圈型）规格：圆形直径 5cm、圆形直径 6cm、5×3cm、5×5cm、6×6cm、7×6cm、7×7cm、8×7cm、8×8cm、10×8cm、10×10cm、11×10cm、12×9cm、12×10cm、14×13cm、16×16cm

问：目前一般三伏贴空白贴是什么材质的？

答：为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带（是一种常见的无纺布）

问：三伏贴空白贴的用途是什么？

答：用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。（中医药膏的新型载体）

问：三伏贴空白贴使用时有什么注意事项？

答：※皮肤破损者、有皮肤病症状者、对胶布过敏者严格禁止使用；

问：三伏贴空白贴使用时怎么粘贴牢固？

答：※使用前请先将对应部位的皮肤进行常规清洁，使皮肤的表面保持清洁、干爽状态；

问：儿童使用三伏贴空白贴有什么需要特别注意的？

答：※儿童需在家长的指导、监督下使用；

问：三伏贴空白贴使用后该怎么处理？

答：※本品为一次性使用产品；※本产品使用完后，请丢进垃圾箱。

问：三伏贴空白贴怎么使用？

答：从医用胶布的一侧掀开底纸，使胶布的胶面对准皮肤表面需要加强固定的部位进行覆盖粘贴，再对胶布的四周进行适当力度地按压以加强粘贴力。

问：三伏贴空白贴使用时有什么需要特别注意的事项？

答：※禁止胶贴直接接触创面；※如皮肤出现过敏现象或任何不适，请立即停止使用并咨询专业医生，不要自行处理；※儿童需在家长的指导、监督下使用。

问：三伏贴空白贴一般要粘贴多长时间呢？

答：皮肤同一部位医用胶布单次建议使用的的时间约为 3-4 小时，同一部位如需连续使用时需要间隔约 3-4 小时，避免长时间粘贴导致皮肤出现不适。

问：三伏贴空白贴用完后怎么从皮肤上面去掉？

答：医用胶布使用完毕后，宜从胶布的一个角轻柔且缓慢匀速地掀起（施力角为 180°），防止胶布从皮肤剥离时产生不适影响。

问：三伏贴空白贴需要如何保存？对环境有什么要求？

答：密闭后放置于常温、清凉、干燥、通风、清洁的地方，避免阳光直接照射；利用交通工具在常温下运输，防止雨淋、日晒、挤压；

问：三伏贴空白贴的使用期限是多久？

答：三年

问：三伏贴空白贴的生产日期从哪里看？

答：看包装的标签

问：三伏贴空白贴的产品说明书有没有？

答：有，看这里

问：现在新型的三伏贴空白贴无纺布材料有什么明显的优点？

答：低敏、抗汗、持粘、舒适、易用

问：三伏贴空白贴市面上有品牌吗？

答：有，印康

问：三伏贴空白贴有没有自粘性？

答：有粘性

问：三伏贴空白贴的另一层纸有什么作用呢？

答：保护胶面的，常见的是硅油纸